

選手抗原検査マニュアル

手順

- ①前日受付にてチーム代表者がチーム人数分の抗原検査キットを貰う。
- ②選手はキットを受け取り次第速やかに実施する。(別途マニュアル資料参照)
- ③検査結果が出たら、キットに自分のレースナンバーを余白に記入し、ラインがしっかり見えるように写真を撮る。
- ④翌日、及び翌々日の当日受付にて自分のレースナンバー記入済みの写真を提示して陰性を証明する。(スマホ可)
- ⑤手順完了。

提示写真の目安



【注意点】(重要ですので各自よくお読みになってください)

- ・結果が出てから 20 分以上放置するとラインが消えて無効になる可能性がありますので速やかに写真を撮影してください。
- ・インカレ、スプリント両方に出場される方は 16 日インカレでの提示のみで 17 日スプリント分の提示の必要はございません。

※検査結果が無効だった場合

予備分をお渡ししますので再度実施して下さい。予備分もなくなった場合は当日現地に行いますので時間に余裕をもって受付にお越しください。

※検査結果が陽性だった場合

各自治体保健所の指示に従って、速やかに帰宅の準備をお願いいたします。陽性者及び濃厚接触者の方の大会の出場を認めることはできませんのでご了承ください。

※当日受付に写真を忘れた場合

現地当日受付にて再度検査を実施します。再検査時間で受付時間を超過してしまいペナルティ付与となりましても自己責任となりますのでご了承ください。

お問い合わせ


jutu19info@gmail.com

唾液抗原スピードテストキットの使用法①（準備について）



入念に手を洗います


検査前30分前から、飲食(ガムや飴含む)、喫煙などはお控えください。
検査が正常に行えません。

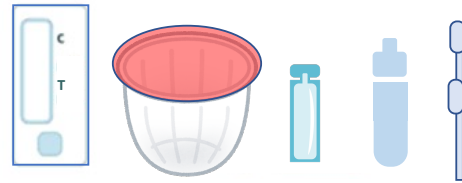

お手元の検査キットの内包物をご確認ください


テスター/カップ/検査液/
抽出チューブ/蓋/スポイト
が揃っているかご確認ください

1 2
3 4

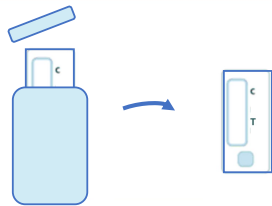

テスターを開封してください

テスターを袋から取り出し、
清潔で平らな場所にテスターをおいてください。

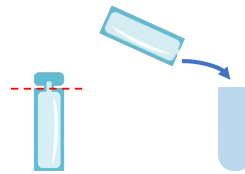


検査液を開封し、検査チューブに全て移し替えます。

抽出チューブに、検査液を全量入れてください。



唾液抗原スピードテストキットの使用法②（検査）

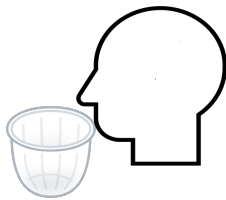

カップに0.5~1ccほど唾液を入れてください。

唾液が出ない場合は、口を閉じて数分間うつむくと自然と唾液が出やすくなります。




スポイトを使用して唾液を吸い取ってください。

上の空洞部を強く押して、下の空洞に唾液がしっかり溜まるまで抽出してください。

5 6
7 8



スポイトで吸い取った唾液を抽出チューブに入れてください。

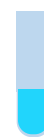

10回転

抽出チューブを10回ほどゆっくり回し、唾液と検査液を混合させてください。

気泡の発生を防ぐため、
優しく扱うようにしてください。



唾液抗原スピードテストキットの使用法③（検査について）



唾液抗原スピードテストキットの使用法④（検査結果について）



CラインとTラインに
赤紫色のラインが表示されたとき



陽性反応です


※まれに、Tラインが薄らと表示されることがあります。
ラインの判別が難しい場合は判定結果の写真をABCプランニング機までご送付ください。



Cラインのみ赤紫色のラインが表示されたとき



陰性反応です

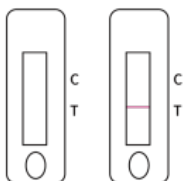

Cラインに赤紫色のラインが表示されないとき



検査結果は無効です。
もう一度やり直して
ください

※検査時間は15分を厳守してください。陰性の場合であっても、検査開始から20分以上が経過すると、
Tラインが表示される場合があり、正しい検査結果がわからなくなることがあります。

